

pfmmedical

Quality and Experience

Informationen für Patienten
ASEPT® Drainage System


ASEPT® Drainage Kit L
zur Anwendung als Nieder-
vakuum- oder Schwerkraft-
drainage

www.pfmmedical.com




Vorbereitung


Um eine hygienische Drainage zu gewährleisten, beachten Sie bitte die nachfolgenden Schritte zur Händereinigung und Desinfektion. Eine ausführliche Beschreibung entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

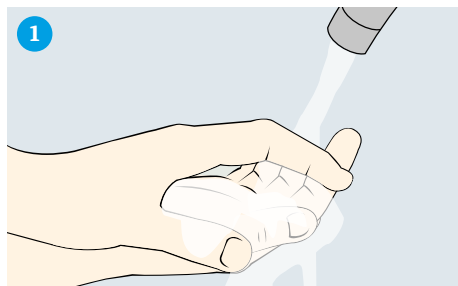


1 | Waschen Sie mindestens eine Minute Ihre Hände mit Seife.

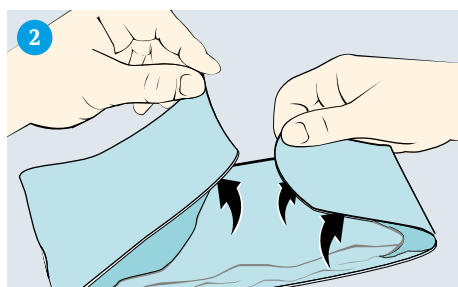


2 | Öffnen Sie die Behandlungseinheit. Legen Sie die blaue Notfallklemme in greifbare Nähe.

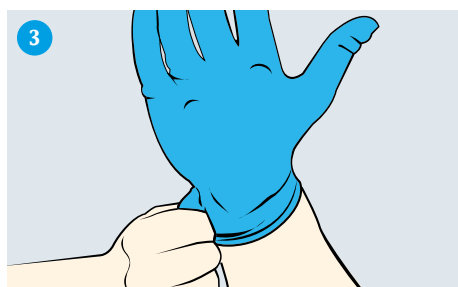


3 | Ziehen Sie die Handschuhe an. Nur am Umschlag anfassen!

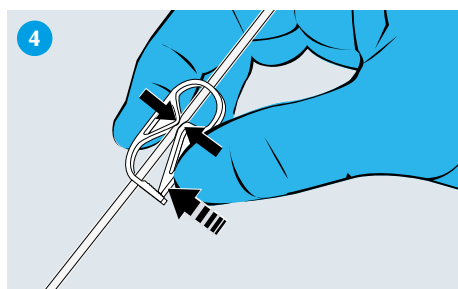

4 | Schließen Sie die Schlauchklemme vollständig.

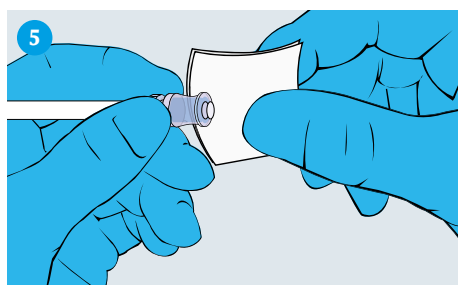

5 | Wischen Sie zur Desinfektion mit einem Alkoholtupfer seitlich um und über das Ventil, insbesondere auch über die hellblaue Silikonmembran. Verwerfen Sie den Tupfer im Anschluss.

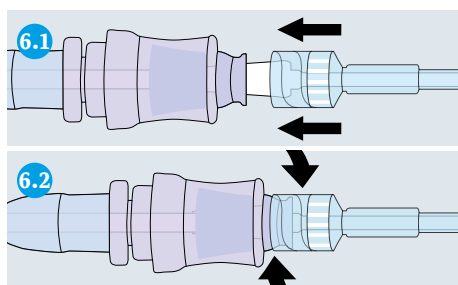


6.1 | Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie den ASEPT® Verbinder in die Ventilöffnung.

6.2 | Drehen Sie den ASEPT® Verbinder im Uhrzeigersinn in den blauen Ventileinsatz (Silikonmembran).


Anwendung als **Niedervakuum-Drainage** (mit Sog)

Darstellung am Beispiel der Einzelflasche


Hinweis: Bei Verwendung des Zwei-Flaschen-Systems die beiden gleichfarbigen Klemmen immer unmittelbar nacheinander öffnen bzw. schließen.

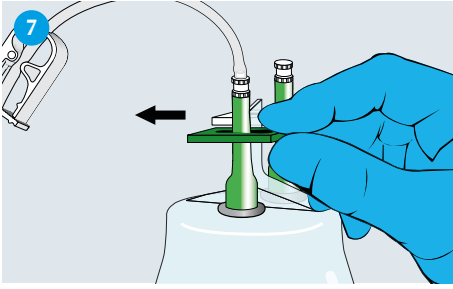


7 | Öffnen Sie die **grüne Flaschen-
klemme**.

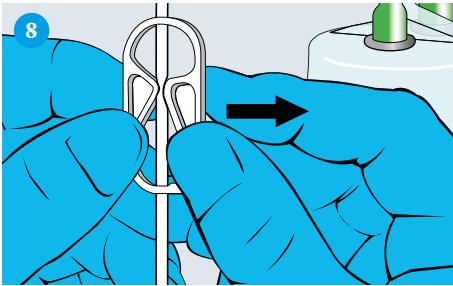


8 | Öffnen Sie nun langsam die
Schlauchklemme. Durch lang-
sames, schrittweises Öffnen wird
das Risiko möglicher auftretender
Schmerzen minimiert.

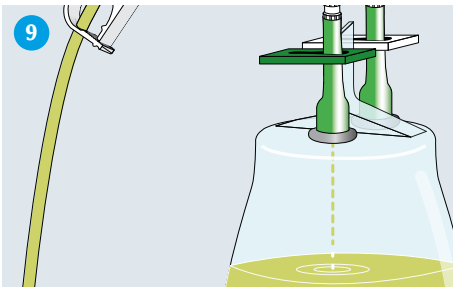


9 | Die Flüssigkeit fließt in die
Flasche.

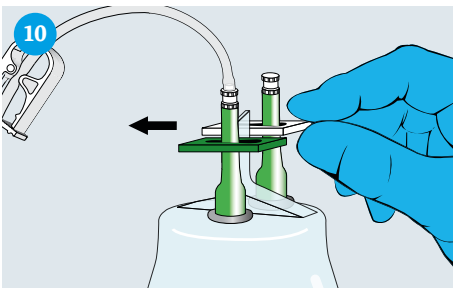

10 | Wenn keine Flüssigkeit mehr
per Niedervakuum (Sog) in die
Flasche nachläuft, öffnen Sie
die **weiße Flaschenklemme**
zur weiteren Verwendung als
Schwerkraft-Drainage.

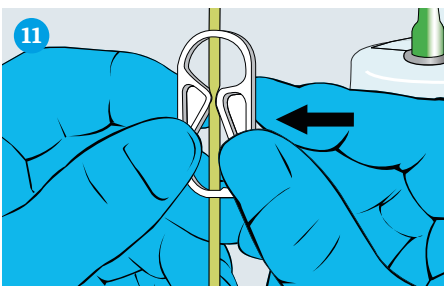

11 | Wenn per Schwerkraft die festge-
legte Drainagemenge erreicht bzw.
die Flasche voll ist, schließen Sie
zunächst die Schlauchklemme.

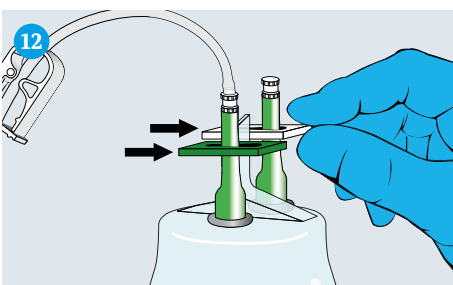


12 | Schließen Sie ebenfalls die weiße
und grüne Flaschenklemme.
Lösen Sie die Ventilverbindung
zwischen Katheter und Flasche.
Die Flasche kann im geschlosse-
nen Zustand entsorgt werden.


Anwendung als **Schwerkraft-Drainage**

Darstellung am Beispiel der Einzelflasche


Hinweis: Bei Verwendung dieses Zwei-Flaschen-Systems die beiden gleichfarbigen Klemmen immer unmittelbar nacheinander öffnen bzw. schließen.

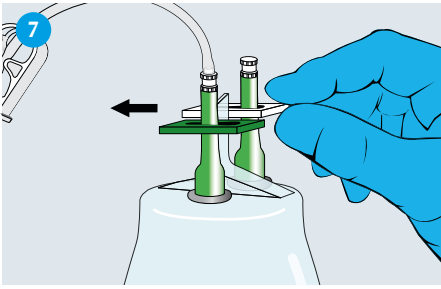


- 7 | Öffnen Sie die **weisse Flaschen-
klemme**, um den vorhandenen
Sog aus der Flasche abzulassen.
Es dauert nur einige Sekunden,
bis der Sog durch den Luftfilter
der Flasche entwichen ist.

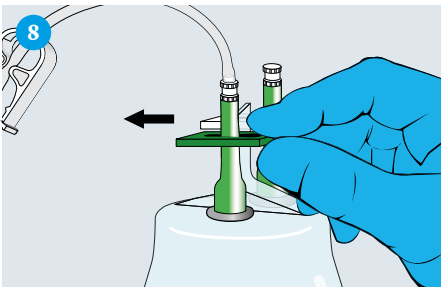


- 8 | Öffnen Sie nun die **grüne
Flaschenklemme** zur Drainage
per Schwerkraft.

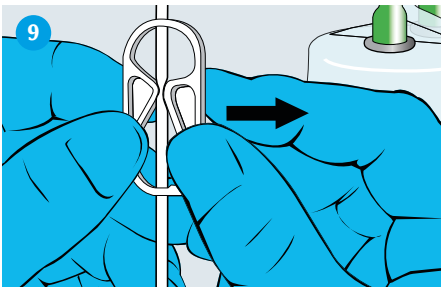


- 9 | Öffnen Sie danach langsam die
Schlauchklemme. Durch lang-
sames, schrittweises Öffnen wird
das Risiko möglicher auftretender
Schmerzen minimiert.

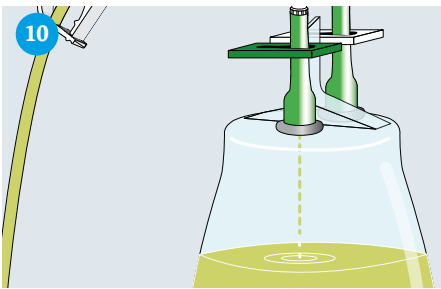

- 10 | Die Flüssigkeit fließt in die
Flasche.

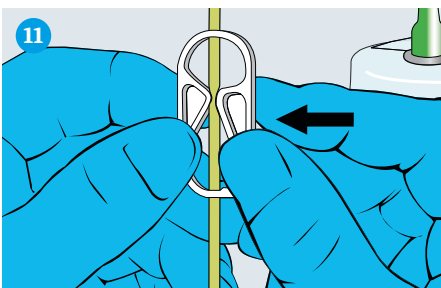


- 11 | Wenn die festgelegte Drainage-
menge erreicht bzw. die Flasche
voll ist, schließen Sie zunächst
die Schlauchklemme.

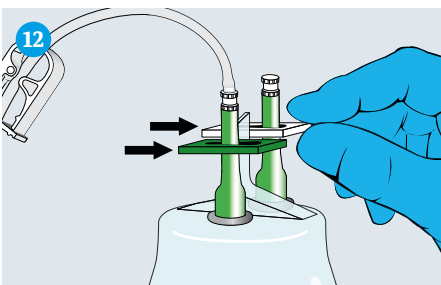


- 12 | Schließen Sie ebenfalls die weiße
und grüne Flaschenklemme.
Lösen Sie die Ventilverbindung
zwischen Katheter und Flasche.
Die Flasche kann im geschlosse-
nen Zustand entsorgt werden.

Nachbereitung


Um möglichen Entzündungen und Infektionen an der Katheteraustrittsstelle vorzubeugen, ist nach der Drainage eine gründliche Nachsorge erforderlich.

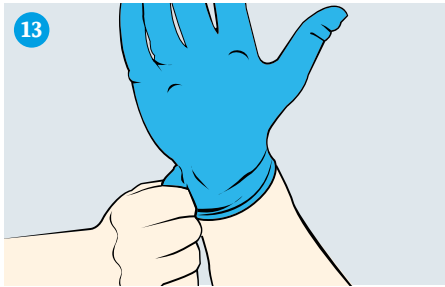


13 | Ziehen Sie das zweite Paar Handschuhe an. Nur am Umschlag anfassen!

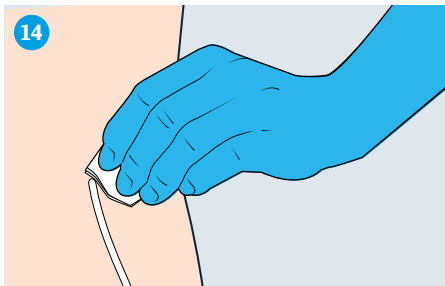


14 | Reinigen Sie die Katheteraustrittsstelle und das Ventil mit je einem frischen Alkoholtupfer.

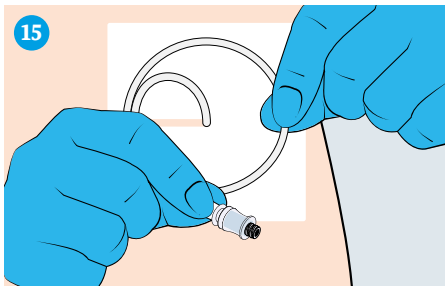


15 | Positionieren Sie das Katheterpad um den Katheter und legen Sie den Katheter spiralförmig darüber.

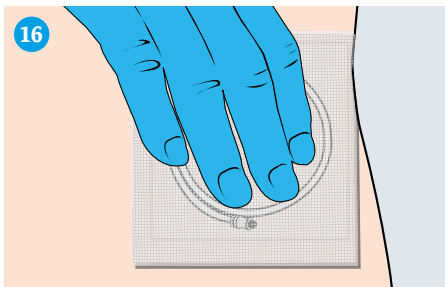

16 | Decken Sie den Katheter vollständig mit den Kompressen ab.

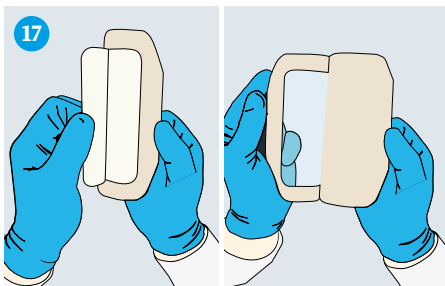


17 | Ziehen Sie zuerst das nicht bedruckte Papier vom Pflaster ab. Der Rahmen bleibt am Pflaster kleben. Ziehen Sie dann das bedruckte Papier vom Pflaster ab. Die klebende Pflasterseite liegt nun frei.

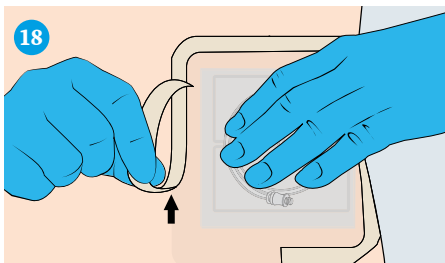

18 | Kleben Sie das Pflaster mit der Klebeseite über die Komresse und entfernen Sie den Papierrahmen. Achten Sie darauf, dass das Pflaster Katheter und Kompressen vollständig bedeckt.

Hinweis

Bevor Sie eines der hier beschriebenen Produkte einsetzen, müssen Sie durch einen Arzt oder eine qualifizierte Pflegekraft in die Anwendung eingewiesen worden sein.

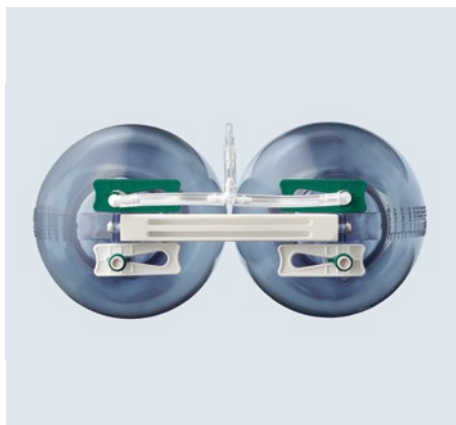

ASEPT® 3000 ml Drainage Kit L



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung!

Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu den ASEPT® Produkten?



asept@pfmmedical.com



www.pfmmedical.com/asept



+49 (0) 2236 9641-530

Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr

Fr 8.00 - 15.00 Uhr

pfm medical tpm gmbh
Wankelstraße 60
50996 Köln
Germany

 pfm medical mepro gmbh
Am Söterberg 4
66620 Nonnweiler
Germany

Zertifiziert nach DIN EN ISO 13485

CE 0124

www.pfmmedical.com

Ihre Informationsquelle zu den Produkten der pfm medical ag



(0 1) 0 4 0 4 2 3 0 1 1 8 2 0 0 5 (1 0) 0 9 . 2 0 1 6

PB3703DE/09.2016