

ASEPT® Drainage System: Versorgungsablauf

Grundsätzlich

- ▶ Katheter verfügt über selbstschließendes, kappenloses Luer Lock-Ventil.
- ▶ Bei Nichtgebrauch Katheter steril verbinden.
- ▶ Zur ambulanten Drainage liefert pfm medical spezielle Hochvakuum- oder Niedervakuum-/Schwerkraftdrainageflaschen.
Die Anwendung wird durch pfm medical-Mitarbeiter geschult.
Dazu muss das Fax-Formular „Schulungsanmeldung“ (liegt Katheter Kit bei) genutzt werden.
- ▶ Kontaktieren Sie Ihren Einkauf zur (Nach-)Bestellung von ASEPT® Produkten.



Vor Katheter-Implantation

- ▶ Klärung, wer ambulante Drainage durchführt (Pflegedienst, Patient oder Angehöriger)
- ▶ Fax-Formular „Schulungsanmeldung“ von Patient unterschreiben lassen.

Vor Entlassung

- ▶ Formular „Schulungsanmeldung“ komplett ausgefüllt an pfm medical faxen.
- ▶ Patienten nur drainiert entlassen.
- ▶ Katheter verbinden.
- ▶ Art des ASEPT® Drainage Systems (Hochvakuum oder Niedervakuum/Schwerkraft), pfm medical-Kontakt, Drainage-Volumen und Drainage-Intervall im Entlassbrief nennen.
Vorschlag: Der implantierte ASEPT® Dauerdrainagekatheter ermöglicht mittels spezieller Drainageflaschen die ambulante Drainage. Diese Drainageflaschen sind über ein patientenbezogenes Hilfsmittelrezept bei der Firma pfm medical erhältlich:

pfm medical tpm gmbh
Wankelstraße 60
50996 Köln

T 02236 9641-530
F 02236 9641-9950

asept@pfmmedical.com
www.pfmmedical.com